



**Spartan de Argentina Productos Químicos S.A.**

# **Peroxy4D™**

## **Limpiador Desinfectante de Superficies Fijas y Artículos no Críticos para uso Hospitalario**

### **Propiedades:**

**PEROXY 4D** es un desinfectante de nivel intermedio, detergente y desodorante de alto rendimiento, indicado para áreas hospitalarias que requieran limpieza y desinfección en una sola operación. Su **innovadora fórmula combina dos activos biocidas que actúan por mecanismos moleculares diferentes**. El Peróxido de Hidrógeno elimina los microorganismos por oxidación, mientras que el amonio Cuaternario de 5ª Generación actúa por desnaturalización, además de ejercer acción bacteriostática sobre las superficies tratadas. **PEROXY 4D** posee ensayos de laboratorio que comprueban su eficacia contra *Staphylococcus aureus*, *Salmonella choleraesuis*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterococcus hirae*, *Escherichia coli*, *Tricophyton mentagrophytes*, *Aspergillus niger*, *Candida albicans*. También ha sido testeado contra bacterias multirresistentes como *Acinetobacter baumannii*, *Klebsiella Pneumoniae Carbapenemasa* (KPC), *Staphylococcus MRSA*, *Mycobacterium bovis*, *Mycobacterium smegmatis* y esporas de *Clostridium difficile*. AL contener Amonio Cuaternario, exhibe acción bacteriostática de hasta 72 horas (pruebas en condiciones de laboratorio).

**PEROXY 4D** está indicado para **áreas críticas**, tales como centros quirúrgicos, centros obstétricos, UTI, UTI Neonatal, unidad de hemodinámica, sector de hemodiálisis, unidad de trasplante, unidad de quemados, unidad de aislamiento, área sucia de la lavandería; en **áreas semicríticas** tales como enfermerías, habitaciones, ambulatorios, baños, central de clasificación, etc., y en **áreas no críticas** tales como los almacenes y las áreas administrativas. **PEROXY 4D** es también adecuado para laboratorios de análisis clínicos, clínicas médicas, odontológicas, de estética y veterinaria. Es ideal para desinfección de superficies fijas tales como pisos, paredes, techos, puertas, bancos, escaleras, ventanas, vidrios, luminarias, equipos, muebles, vajillas sanitarias, camillas, incubadoras, etc., y artículos no críticos tales como termómetros axilares, estetoscopios, soporte de suero, aparatos de presión, urinal, papagayo, cuencos, cuba riñón, sillas de baño, etc. **PEROXY 4D** es también un desinfectante de nivel intermedio, indicado para artículos de inhaloterapia y asistencia ventilatoria.

**PEROXY 4D** presenta acción virucida según norma EPA 810.2200: Prueba de eficacia virucida sobre superficies duras en presencia de suero orgánico al 5% y 200 ppm de agua dura (EPA Reg. No. 1839-224-5741) contra Virus de la Inmunodeficiencia Humana Tipo 1 (1 minuto), Virus de Influenza A, Virus de Hepatitis B y Virus de Hepatitis C (10 minutos).  
Hepatitis B Virus.

### **Instrucciones de uso:**

**Algunas personas pueden ser sensibles a los componentes de este producto. Antes de usar, asegúrese de leer completamente el rótulo presente en el envase, así como las Hojas de Seguridad.**

**No mezcle este ni ningún producto químico.**



## Spartan de Argentina Productos Químicos S.A.

### ***Limpieza y desinfección de nivel intermedio***

Utilizar el **PEROXY 4D** diluido en agua en una proporción de hasta 1 parte de producto para 25 partes de agua (según nivel de carga orgánica a remover de la superficie). Aplicar la solución de producto con un paño microfibra o fibra de limpieza. Dejar actuar 10 minutos. Aclarar de ser necesario.

### ***Limpieza y desinfección de superficies fijas y artículos no críticos***

Preparar una solución acuosa de **PEROXY 4D** diluyendo hasta una proporción de 1 parte de producto por cada 64 partes de agua (según nivel de carga orgánica a remover de la superficie). Aplicar mediante paño descartable, microfibra, fibra de limpieza o mopa y dejar actuar por 10 minutos. Aclarar de ser necesario.

**Asegúrese de leer completamente todas las instrucciones de uso, precauciones y medidas de primeros auxilios declaradas en las etiquetas de los productos de este o cualquier otro producto de Spartan Chemical. Por más información, consulte a su empleador o a un médico. Las Fichas de Seguridad de todos los productos de Spartan Chemical están disponibles a través de su distribuidor autorizado o visitando la página web [www.spartanlatam.com](http://www.spartanlatam.com).**

### **Especificaciones técnicas:**

Apariencia:	Líquido transparente	Aroma:	Característico
Color:	Incoloro	pH:	2,0 – 3,0
Densidad (a 24°C):	0,980 – 1,040 gr/cm <sup>3</sup> .	Solubilidad:	Completa en agua
Viscosidad (a 24°C):	No especificada	Contenido de activos:	11,0 – 14,0%
Activos desinfectantes:	Compuestos de Amonio Cuaternario (Cloruro de Alquil Benzil Amonio + Cloruro de Octil Decil Dimetil Amonio + Cloruro de Didecil Dimetil Amonio + Cloruro de Dioctil Dimetil Amonio): 5,6%. Peróxido de Hidrógeno: 4,25%.		

### **Precauciones:**

**MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

Evite el contacto con la piel. Después de utilizar el producto lave y seque las manos. No mezclar con productos ácidos u otras sustancias químicas, se pueden producir reacciones violentas. Mezclar solo con agua. No aplicar sobre superficies calientes. Emplear guantes durante la manipulación y aplicación del producto. En caso de contacto con ojos o la piel, lave inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos. En caso de ingestión, no provoque el vómito y consulte inmediatamente al Centro Nacional de Intoxicaciones al teléfono: 0800-3330160 o al médico llevando el envase o rótulo del producto. No trasvasar el producto a envases de alimentos o bebidas. Mantener en su envase original, no reutilice el envase vacío para otros fines.

Para mantener la calidad del producto, conservar en su envase original en lugar fresco y seco, con ventilación adecuada. Evitar que se congele.



## Spartan de Argentina Productos Químicos S.A.

### Presentaciones:

4x5 litros

4x2 litros

**Embalaje:** De alta calidad que evita derrames.

**Garantía:** La fabricación moderna y el control de laboratorio de Spartan de Argentina aseguran una calidad uniforme.



### Spartan de Argentina Productos Químicos S.A.

Av. del Libertador 101, piso 10 - Torre Al Río

B1638BEA, Vicente López, Bs. As.

Tel: 0810-345-3585

e-mail: [contacto@spartanchemical.com.ar](mailto:contacto@spartanchemical.com.ar)

[www.spartanlatam.com](http://www.spartanlatam.com)

Cambiando la Cultura.  
Simplificando la Limpieza.

